


23.8" МОНОБЛОК С КАМЕРОЙ FULL HD (M568) (Всё в одном)

Руководство пользователя

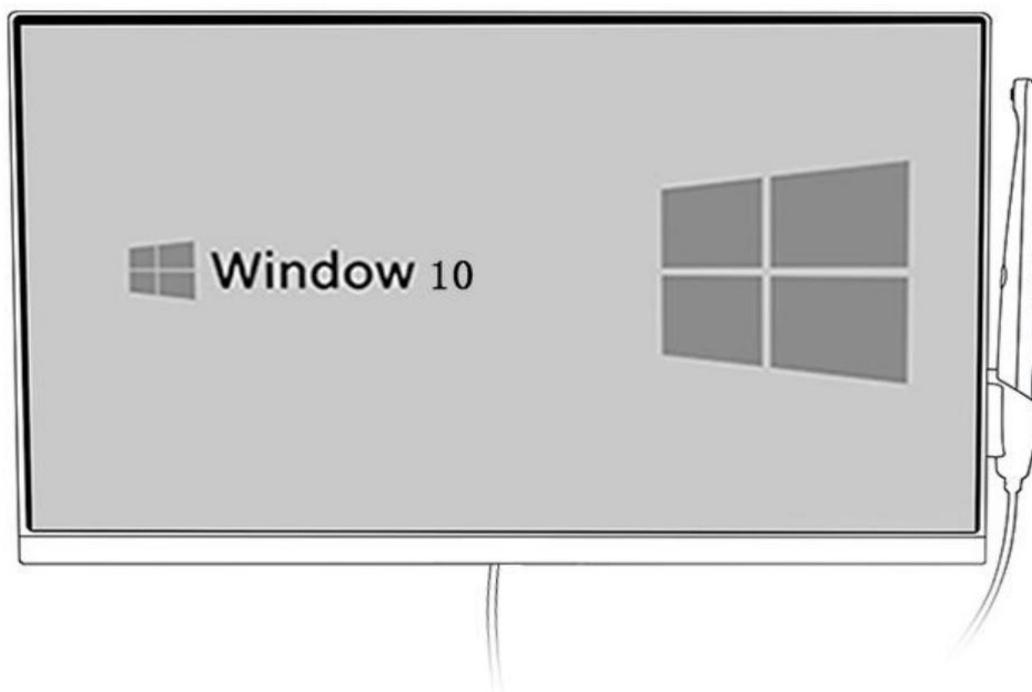

ISO13485

Техника безопасности

- ◆ Не ставьте монитор в неустойчивом месте, где он может упасть.
- ◆ Не храните аккумуляторы в условиях экстремальных температур и влажности.
- ◆ Не подвергайте монитор действию прямых солнечных лучей и других источников тепла
- ◆ Не погружайте монитор в жидкости
- ◆ Не кладите никакие вещи на монитор, не ставьте емкости с водой на монитор
- ◆ Во время грозы отключайте провод от розетки и кабель антенны от устройства
- ◆ Не сдавливайте и не сгибайте провод питания
- ◆ Не допускайте перегрузки в розетке электропитания
- ◆ Протирайте монитор сухой мягкой тряпочкой (избегайте летучих веществ)
- ◆ В случае неисправности не ремонтируйте монитор самостоятельно, обратитесь к специалисту
- ◆ Достаньте и храните аккумулятор в сухой среде, если устройство не используется длительное время
- ◆ При установке монитора, пожалуйста, не ставьте его нагретой областью непосредственно на пол или ковер, во избежание опасности.
- ◆ Установите монитор под руководством специалиста с креплением на стену или потолок.
- ◆ Если оборудование не используется длительное время, отключите провод от розетки.


Особенности

1. Устройство сочетает в себе 23.8-дюймовый сенсорный компьютер и USB интраоральную камеру (всё в одном).
2. Компьютер оснащен системой Windows 7/10, процессором Intel Core i5.
3. Устройство имеет USB интраоральную камеру, стабильную передачу сигнала и сильную защиту от помех.
4. Интраоральная камера оснащена 13 Мпикс линзой высокой четкости с высокой чувствительностью и автофокусировкой.
5. Формат вывода USB 2.0, plug and play, поддерживает различное стоматологическое ПО.
6. Толщина линзы всего 6 мм, компактный размер облегчает работу.
7. Кнопки камеры находятся спереди и сзади ручного блока.
8. Магнитный держатель в стандартной комплектации, когда ручной блок висит в держателе, подсветка объектива автоматически выключается
9. Кабели опционально: прямой / витой.

Характеристики

Тип устройства	Интраоральная камера	Модель	M-568
Матрица	13 Мпикс	Объектив	1/4 CMOS
Фокус	10-40 мм	Угол обзора	105°
Свет	6 белых светодиодов	Ввод	USB 2.0
Разрешение	1920*1080	Вывод	23,8" сенсорный монитор
Конфигурация системы: Windows 7/10, сенсорный экран, память 8 ГБ + 128 ГБ, 5G, wi-fi			

Комплектация

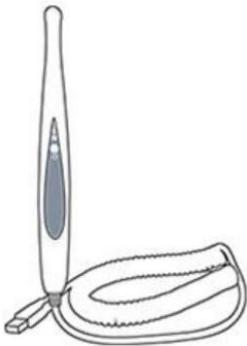


Интраоральная камера



23.8" сенсорный компьютер



Адаптер питания 12 В / 4 А

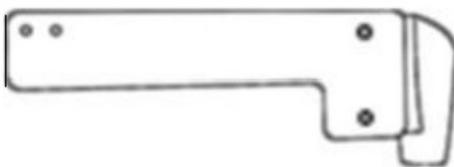


Штатив камеры




Инструкция


Вид монитора спереди

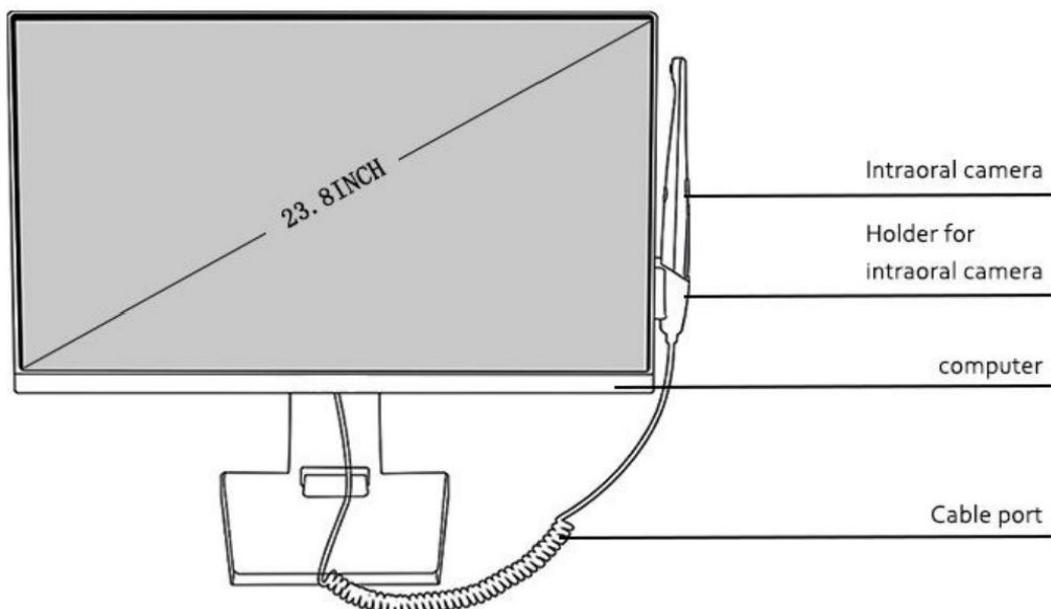


Вид монитора сбоку

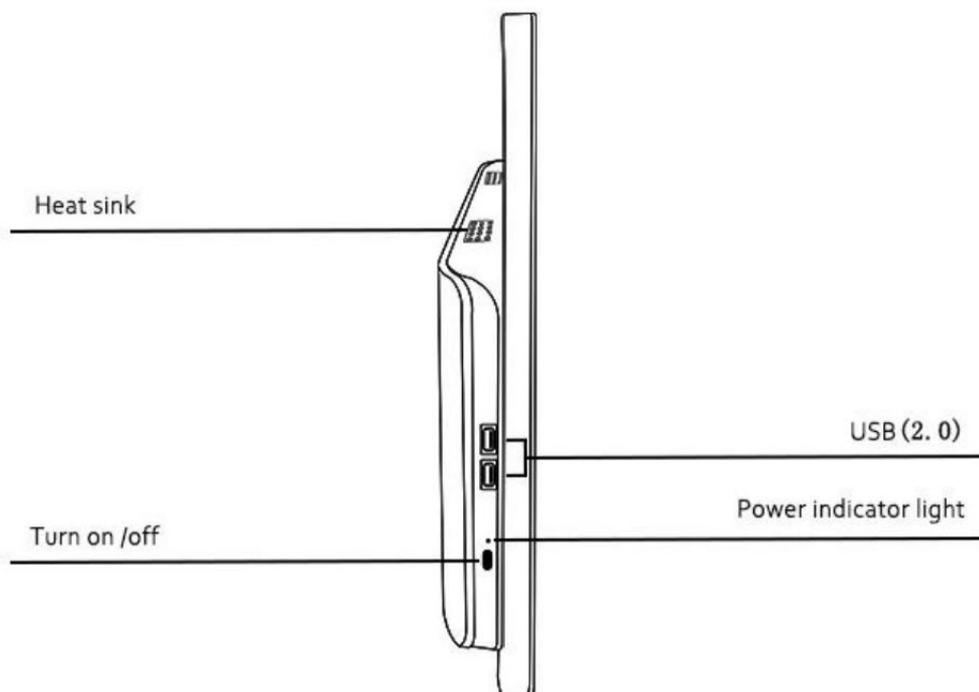

Вид монитора сзади

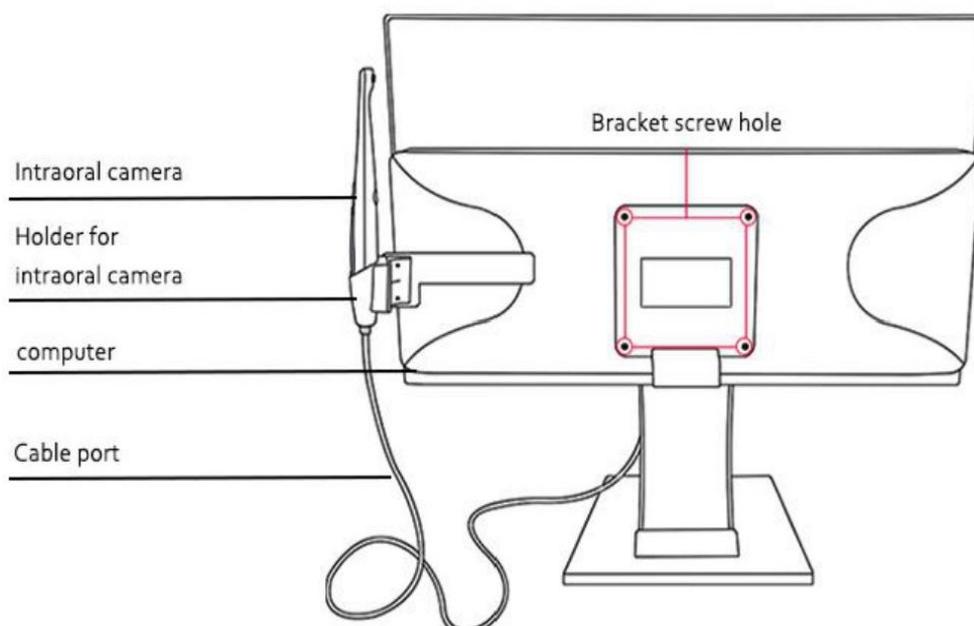

Интерфейс компьютера

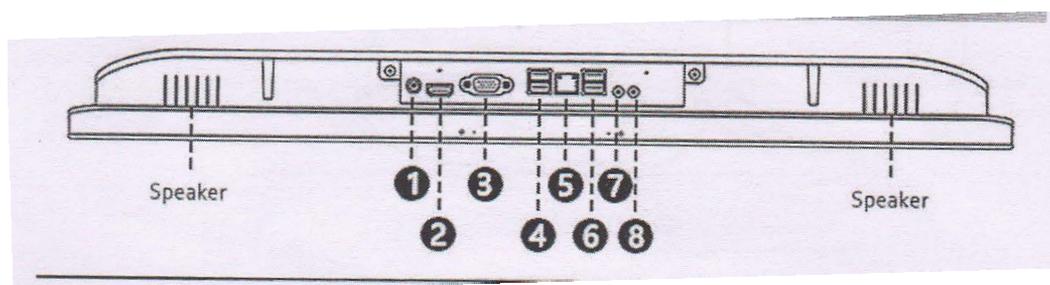

1) DC IN: электропитание

5) LAN: проводной сетевой интерфейс LAN

2) HDMI: мультимедиа-вход

6) USB2.0: USB2.0 порт, обратная
совместимость с USB1.1

3) VGA: вывод видеосигнала

7) MIC: выход на микрофон


4) USB3.0: порт USB 3.0, обратная
совместимость с USB 2.0/USB1.1

8) OUT: аудиовыход стерео

Функции клавиш

Сзади

Спереди

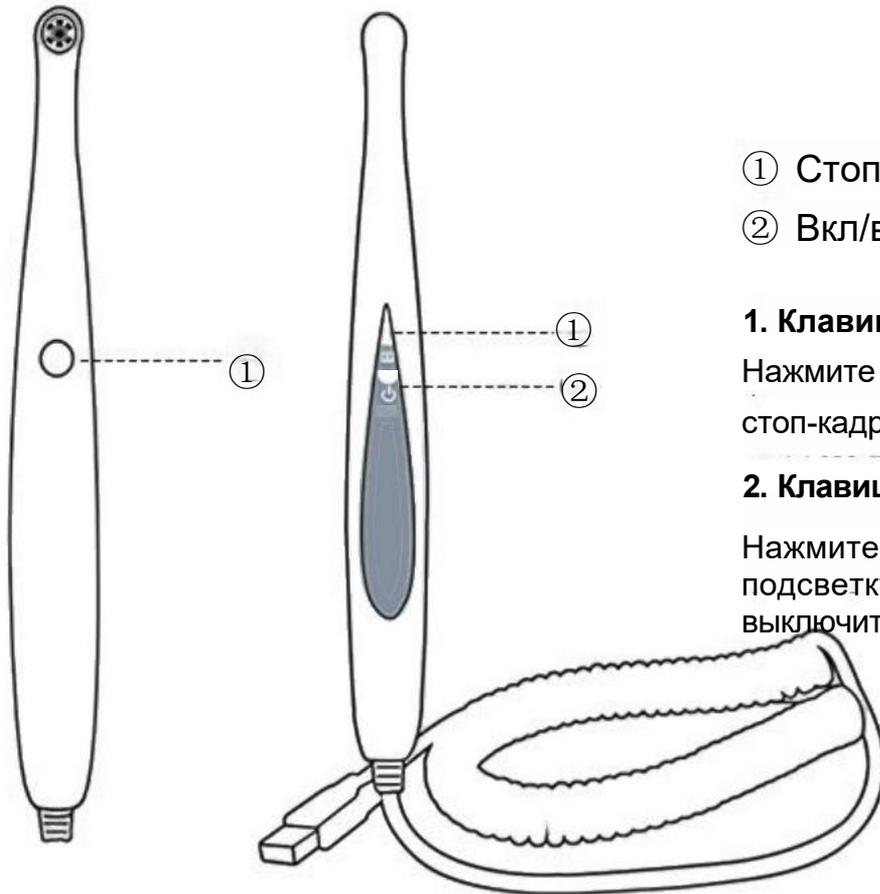

① Стоп-кадр/сохранить

② Вкл/выкл

1. Клавиша 1

Нажмите один раз, чтобы сделать стоп-кадр и сохранить его



2. Клавиша 2

Нажмите один раз, чтобы включить подсветку, нажмите еще раз, чтобы выключить

Порядок действий


1. Подключите USB кабель к компьютеру
2. После входа в программу устройство будет запущено автоматически.
3. С помощью кнопки Capture сделайте фото.
4. Нажмите кнопку Light ON/OFF, чтобы включить подсветку камеры.

Программное обеспечение

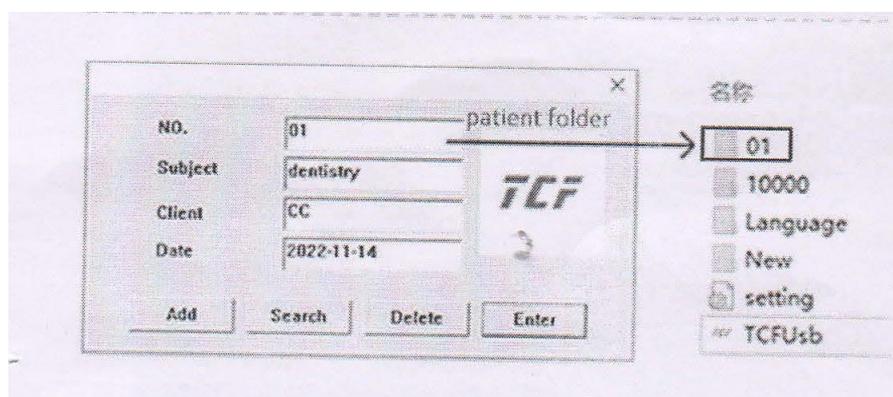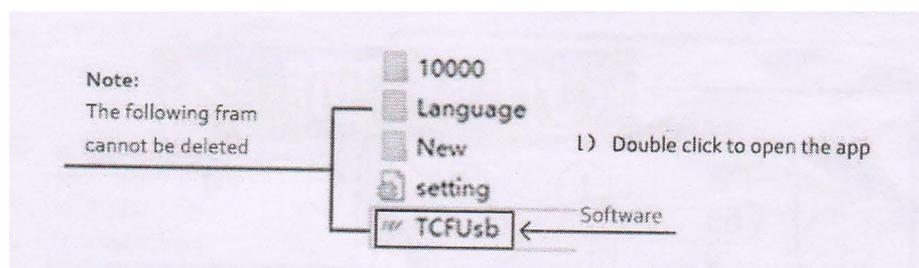

Примечание:
при создании файла
пациента, номер папки будет
назначен автоматически.
Снимки пациента будут
храниться в этой папке

2) Ввод основной информации о пациенте: нажмите Add для сохранения после ввода информации

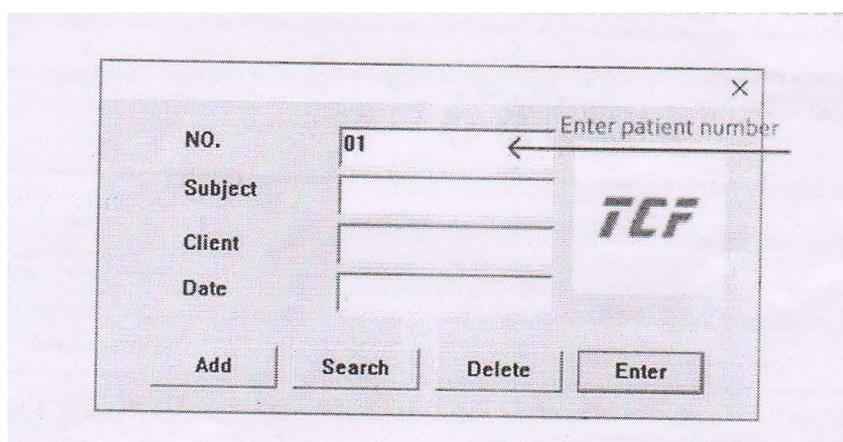


3) Найти основную информацию о пациенте

При поиске пациента откройте следующую страницу, введите номер пациента и нажмите ОК или кнопку Back, чтобы перейти на страницу с фотографией пациента.

Примечание: если вы не выбирали пациента, чтобы войти напрямую, полученное фото будет сохранено в папке "10000".

4) Функции программы

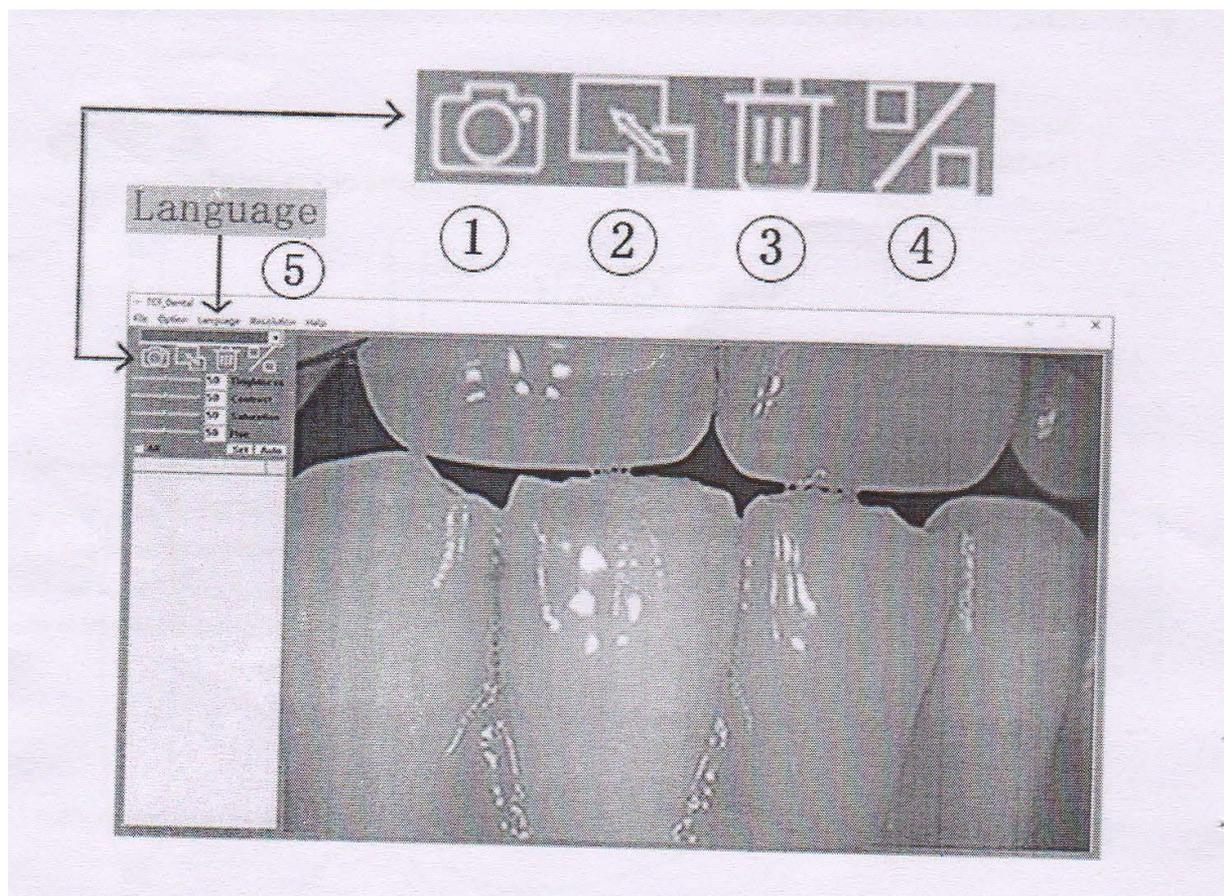

- 1) **Захват:** нажмите кнопку на ручном блоке, чтобы сделать фото или нажмите значок 1 на экране.
- 2) **Полное изображение:** нажмите значок 2, чтобы развернуть снимок на весь экран, нажмите еще раз, чтобы вернуться к исходному размеру.
- 3) **Удалить:** отметьте галочками изображения, которые не нужно сохранять. Снова нажмите значок 3, чтобы удалить снимки.
- 4) **Сравнение:** отметьте галочками фото, которые хотите сравнить, затем нажмите значок 4, чтобы удалить фото.
- 5) **Язык:** китайский/английский/французский/русский/немецкий/корейский/японский/испанский.

Примечания



Внимание: во избежание поражения током не открывайте заднюю панель. Для обслуживания обратитесь к профессионалам.

Предупреждение: не допускайте попадания влаги на монитор, это может привести к повреждениям, возгоранию и поражению током.

Пожалуйста, внимательно прочитайте следующие меры предосторожности и сохраните инструкцию для последующих обращений.

Устройство

Не допускайте контакта сигнальных разъемов с острыми, металлическими предметами или жидкостями, чтобы избежать короткого замыкания и повреждения продукта. Если не используете устройство некоторое время, отсоедините провод питания от розетки.

Не разбирайте продукт, это может повредить его. Не прилагайте сильное давление.

Электричество

Используйте только оригинальные зарядные устройства от производителя, чтобы не допустить повреждения камеры. Если провод питания или вилка повреждены, не используйте их. Не сдавливайте провод питания и сигнальный кабель. Не подключайте кабели во влажной среде.

Условия среды

Расположите устройство в сухом проветриваемом месте.

Избегайте слишком холодной, горячей или влажной среды, прямых солнечных лучей и пыли.

Устранение неполадок

Перед обращением в гарантийный отдел компании, пожалуйста, выполните следующую проверку, если проблему все еще не удастся решить, запишите модель и серийный номер машины и обратитесь к контрагенту в вашем регионе.

1) Монитор

Нет звука и изображения

- o Убедитесь, что провод питания вставлен в розетку, а в сети есть электричество.
- o Убедитесь, что нажали кнопку включения на передней панели.
- o Проверьте настройки яркости и контрастности
- o Проверьте громкость.

Изображение нормальное, но нет звука

- o Проверьте громкость
- o Убедитесь, что звук не выключен с кнопки на пульте.
- O Проверьте звуковую систему

Черно-белое изображение

- O Настройте цветность
- o Проверьте цветовую систему

Помехи с приемом звука и изображения

- O Уберите подальше расположенные близко электроприборы.
- o Включите вилку телевизора в розетку.

Зернистое изображение

- 0 Проверьте подключение и ориентацию антенны.

Не работает пульт управления

- O Замените батарейки в пульте
- O Очистите верхнюю грань пульта (коннектор)
- O Проверьте контакты батареек

2) Интраоральная камера

Если возникли проблемы с устройством, попробуйте выполнить следующие действия, если проблема не решена, обратитесь к дилеру или производителю.

№	Проблема	Решение
1	Не срабатывает выключатель (ON/OFF)	1.Проверьте, включен ли провод в розетку 2. Проверьте подключение кабеля
2	Нет изображения на мониторе	1.Проверьте соединение монитора 2. Убедитесь, что на компьютере установлен драйвер, а настройки правильные
3	Изображение на экране слегка размыто	При первом включении устройства это нормально, немного подождите
4	Дрожит изображение после стоп-кадра	При стоп-кадре детектор должен оставаться неподвижным, чтобы получить снимок, попробуйте выполнить еще раз
5	Пятна на изображении	1. Проверьте, нет ли пятен на экране 2. Проверьте, нет ли пятен на линзе 3. Если проблема не в этом, обратитесь к производителю или к дилеру

Гарантийная информация:

Пожалуйста, сохраните счет на покупку и гарантийный талон, перед применением заполните гарантийный талон, отправьте профиль пользователя в наш гарантийный отдел, чтобы мы могли предоставить лучшие услуги в случае неисправности, обращайтесь в наш гарантийный отдел немедленно.

В случае удаления, неправильного использования или форс-мажорных обстоятельств, вызвавших повреждение товара, гарантия на все это не распространяется.